

## Fiche Bon Usage

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

<b>Collecteurs à urine</b>	
1. Domaine d'application	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classification Cladimed G50BA... et G50BB... et G50BC</li> <li>- Collecteur seul : classe I</li> <li>- Si pré-connecté : classe I ou IIa selon la classe de la sonde.</li> </ul>
2. Définition	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poche destinée à être connectée à une sonde permettant le recueil des urines.</li> <li>- Synonymes : poche collectrice, sac collecteur, collecteur, dispositif de recueil.</li> </ul>
3. Référentiels :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <ul style="list-style-type: none"> <li>- NF ISO 86-69-1</li> <li>- LPPR : non</li> </ul> </li> <li>b. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrets 93-95 du 15/03/1993 et 2002-194 du 11/02/2002 relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.</li> </ul> </li> <li>c. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales (67 à 72). CTIN. 1999</li> </ul> </li> </ul>
a. Les référentiels réglementaires & normatifs existants b. Les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant c. Les bonnes pratiques de sociétés savantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiches techniques des fabricants ou distributeurs.</li> <li>c. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiche guide d'information au patient porteur de sonde, AFU.</li> <li>- Prévention de l'infection urinaire nosocomiale. Recommandations pour la pose et la gestion d'une sonde vésicale. C CLIN Sud-Ouest, 2003.</li> <li>- Infections urinaires nosocomiales. Conférence de consensus co-organisée par la Société de Pathologie Infectieuse de langue française et l'Association française d'Urologie, 2002.</li> <li>- Rapport sur la conférence de consensus sur les infections urinaires nosocomiales chez l'adulte, 27/11/02.</li> </ul> </li> </ul>
4. La composition et description du produit dans son ensemble :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <ul style="list-style-type: none"> <li>- En général en PVC.</li> </ul> </li> <li>b. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume : de 500 ml à 5 litres en fonction des indications</li> <li>- Forme : optimisée pour assurer une vidange optimale</li> <li>- Ce dispositif peut être stérile intérieur/extérieur ou seulement intérieur.</li> </ul> </li> </ul>
a. Matériau(x) b. Données géométriques et dimensionnelles c. Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositif comportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une graduation volumétrique.</li> <li>• Une tubulure de drainage évitant les plicatures, de 1 mètre environ, d'un diamètre interne de 6 à 9 mm, munie d'un clamp, avec un connecteur de sonde universel cranté ou non et protégé par un capuchon.</li> <li>• Un dispositif anti-reflux (système de feuillet ou membrane en silicone intégré dans la chambre de gouttage ou autre, ...).</li> <li>• Un système de vidange en bec de canard ou robinet ou clamp mobile ou tirette, ... avec ou sans gousset de protection.</li> <li>• Un système de fixation : œillets intégrés à la poche ou crochets de fixation, et/ou cordelettes.</li> </ul> </li> <li>+ éventuellement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une chambre de gouttage placée entre la tubulure et la poche.</li> <li>• Un filtre à air hydrophobe et/ou antibactérien qui facilite l'écoulement de l'urine en assurant l'équilibre des pressions.</li> <li>• Un système de prélèvement auto-obturant de préférence sans latex facile d'accès, en général situé sur le connecteur.</li> </ul> </li> <li>- <b>Poche de recueil ambulatoire</b> (cruel ou jambe) : confort et discrétion</li> <li>- <b>Les systèmes pré-connectés</b> : dans ce cas les poches et les sondes sont connectées grâce à une bague intégrée, de manière à assurer un sondage urinaire clos.</li> <li>c.</li> </ul>
5. Indications	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recueil des urines dans le cadre d'un sondage à demeure et/ou intermittent.</li> </ul>
6. Contre indication	RAS
7. Effets indésirables	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allergie au latex</li> </ul>

## Fiche Bon Usage

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

8. Mode d'emploi précautions d'emploi	et/ou - Fermer le robinet de vidange de la poche et connecter si nécessaire la sonde à la poche. - suspendre le collecteur en position déclive sans qu'il touche le sol. - Vérifier l'absence de coude sur la sonde et le collecteur. - Veiller à la vidange de la poche : <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsqu'elle est remplie aux <math>\frac{3}{4}</math>.</li><li>• Et/ou 3 fois par jour minimum.</li><li>• Et/ou avant tout déplacement du patient.</li></ul> - Précautions Emploi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Manipuler le site de vidange avec des gants.</li><li>• Eviter de déconnecter la sonde et le collecteur: ils doivent être posés et enlevés ensemble.</li><li>• Vidanger la poche avant le retrait.</li></ul>
9. Données bibliographiques	- « Les sondes urinaires », C. Arsicault J. Lafont, ADPHSO 1994, 19(2), 7-16. - « Infections urinaires », D. Thiveaud, HMM janvier 2007.