

	Commission technique Euro-pharmat	Date de réactualisation : 08/06/2010
	Fiche Bon Usage	
	Pansements	
Pansement au charbon actif		

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

Domaine d'application	
- Soins	
Définition-abréviations	
<ul style="list-style-type: none"> - Ce sont des pansements constitués de différents supports auxquels a été ajouté du charbon actif, à visée d'absorption des molécules responsables des mauvaises odeurs des plaies. Ils existent sous forme de plaques et compresses. - Cladimed : F51BF01/99 - GMDN : - Pansement primaire et secondaire - Marquage CE : IIb et III 	
Référentiels	
Les référentiels réglementaires et normatifs existants	<ul style="list-style-type: none"> - HAS (ANAES) : conférence de consensus : prévention et traitement des escarres de l'adulte et du sujet âgé (novembre 2001); avis de la Commission d'Evaluation des produits et prestations (CEPP), 7 Mars 2007; avis de la Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDiMST), 12 Janvier 2010.
Les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant	<ul style="list-style-type: none"> - Fiches techniques des fournisseurs.
Les bonnes pratiques de sociétés savantes	<ul style="list-style-type: none"> - Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations.
Composition et description du produit dans son ensemble	
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> - Charbon actif. - Autres composants variables : <ul style="list-style-type: none"> • Couche absorbante (ouate, carboxyméthylcellulose, alginate, polyacrylate, rayonne...). • Ions Argent.
Données géométriques	<ul style="list-style-type: none"> - Compresse et/ou plaque non adhésive.
propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Le charbon actif permet d'absorber les odeurs et d'adsorber les bactéries. - L'absorption des exsudats est plus ou moins importante selon la composition du pansement.
Indications	
<ul style="list-style-type: none"> - Pansement primaire ou secondaire : <ul style="list-style-type: none"> • Plaie malodorante. • Stades de la plaie : tous si la plaie est malodorante. 	
Contre-indications	
<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilité connue à l'un des composants. 	
Effets indésirables	
<ul style="list-style-type: none"> - Rares cas d'irritation et/ou de macération de la peau péri-lésionnelle. 	
Mode d'emploi et /ou précautions d'emploi	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Nettoyer la plaie au savon + eau. Rincer uniquement avec de l'eau ou du sérum physiologique. 2) Bien sécher le pourtour de la plaie par tamponnement (compresse stérile ou non). 3) Réaliser éventuellement une détersion mécanique de la plaie. 4) Appliquer le pansement au charbon sur la plaie ou sur le pansement primaire en laissant déborder de 2-3 cm. 5) Si besoin, ajouter un pansement absorbant. 6) Recouvrir d'un système de maintien (bande, film polyuréthane, ...). 7) Fréquence de changement : <ul style="list-style-type: none"> • Le renouvellement est à effectuer tous les 2 à 3 jours ou plus fréquemment selon l'importance des exsudats et des odeurs. • Le changement quotidien est préconisé en cas de plaie infectée. 	
Remarques :	
<ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de mettre sur la plaie un pansement gras ou interface sous le pansement au charbon en cas de plaie peu ou pas exsudative. - Découpage possible selon les recommandations du fabricant. - L'argent présent dans certains pansements au charbon n'est pas relargué au sein de la plaie 	
Données bibliographiques	
<ul style="list-style-type: none"> - Dossier du CNHIM, décembre 2003, XXIV, 6 - Guide des soins des stomies et des plaies, Journal Plaies Cicatrisations, septembre 2005, X, 50, p : 60-220 - Pansement et objets de pansements, ADPHSO PHARMAT, 1991 - Hygiène des plaies et pansements. C CLIN Ouest. Mai 2004. p 1-95 - Meaume S – Partie 4 – Les alginates et les hydrofibres - Soins N°679, Octobre 2003, pp25-26. - HAS : avis de la Commission d'Evaluation des produits et prestations (CEPP), 7 Mars 2007. - Téot L., Meaume S., Dereure O. Plaies et cicatrisations, Masson Ed, Paris 2005. Chap. 10 Pansements, détersion, mise en décharge, 	

p.231-247.

- CD-rom Mac/PC - Le pied diabétique : de l'évaluation du pied à risque à la prise en charge des plaies. Coordonné par Pr A. Avignon et Pr F. Bonnel. Intrasense Multimédia. Juin 2006.
- CD-rom Mac/PC - Plaies et pertes de substance. Coordonné par Dr L. Téot et Pr F. Bonnel. Intrasense Multimédia. 2006.
- Meaume S., Perez J. Les alginates. Journal des Plaies et Cicatrisations 1999 ; 16 : 24-29.
- Centre de Documentation OCP. L'actualité documentaire. Les dossiers du Pharmacien. Pansements et cicatrisation. 139 p. 2004.
- Documents de travail hospitaliers : Montpellier, Toulouse, Bagnères de Bigorre, Joffre Dupuytren, Lille, Clermont-Ferrand, Lyon, Amiens, Paris Grenoble, ...